



カフアシスト E70 の使い方

※本書は添付文書や取扱説明書にかわるものではありません。 必ず製品に付属の添付文書および取扱説明書をご覧ください。

機器の外観・名称

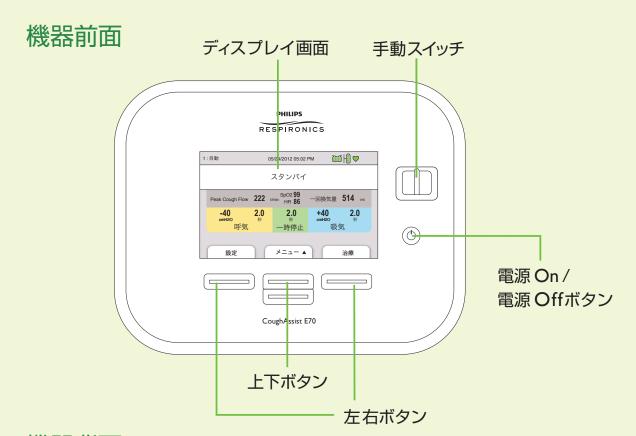


機器背面

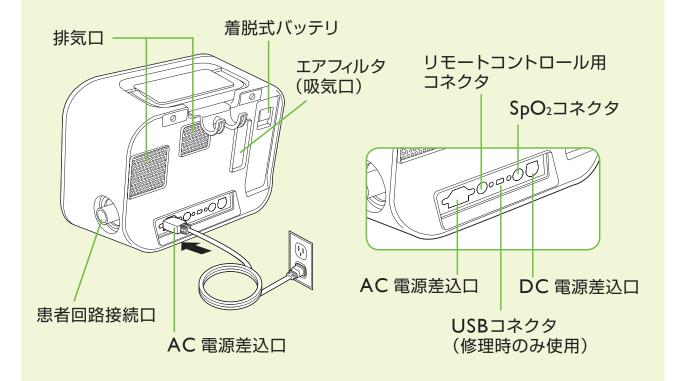

注 記: 治療装置にフットペダルを接続した場合は、手動スイッチが無効になります。

ディスプレイアイコン

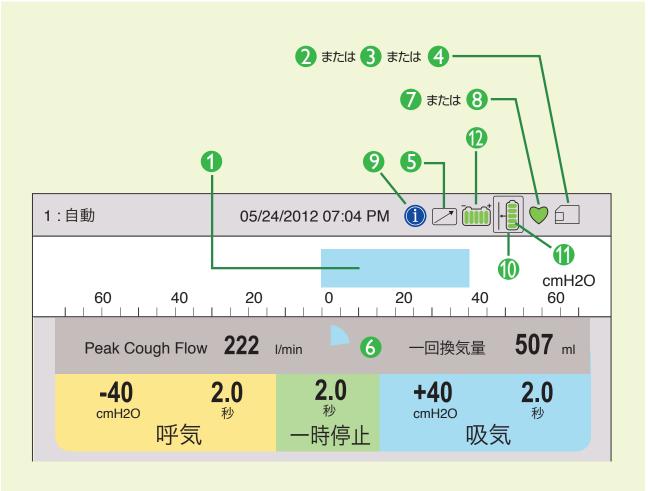




赤枠:残り数分の容量

で実行中、各呼吸相の残り

時間を視覚的に表示します。


呼吸回路の接続

フレキシブルチューブの片方の端にバクテリアフィルタを取り付け、 機器の送気口に接続します。反対側のもう一方にアダプタを介し マスクを接続します。

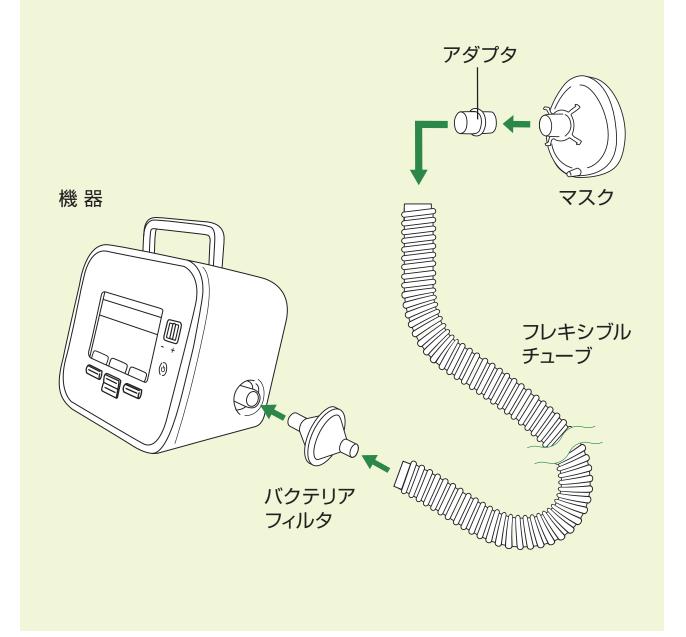

電源のOn


以下の手順で電源をOnにしてください。

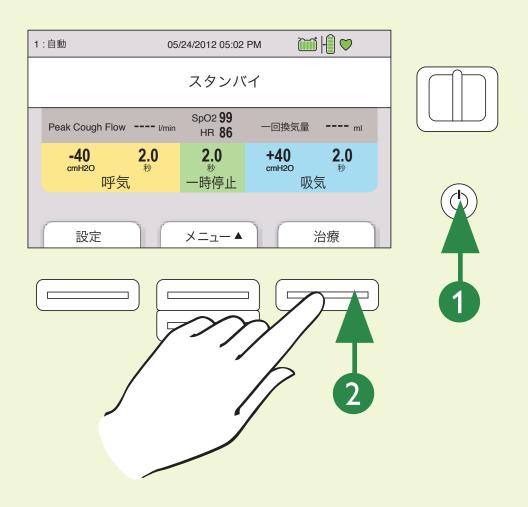

① ボタンを押して電源を **On** にします。右のボタンを押して 「治療」を選択します。「治療」を選択すると装置が作動します。

電源のOff

以下の手順で電源をOffにしてください。

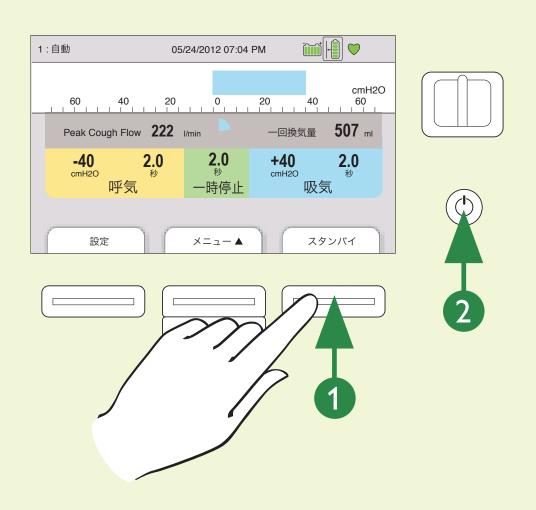

右のボタンを押して「スタンバイ」を選択します。


(①) ボタンを押して電源を Off にします。

プリセット番号の変更 1

本製品はあらかじめ設定された処方設定グループを簡単に選択することができます。(プリセット1、2、または3が選択できます。)以下の手順で番号を変更してください。



② 設定 を押して設定 画面にアクセスします。

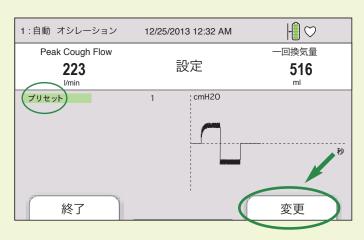

2 プリセットが選択されて いることを確認し、 変更 を押します。



を押し、使用したい プリセット番号に変更します。

プリセット番号の変更 2



4 OK を押し、変更し た設定を有効にします。



6 終了 を押すと、 メイン画面に戻ります。

お手入れ

フレキシブルチューブ、マスク、アダプタ、エアフィルタは定期的に 交換、洗浄が必要です。安全・快適にお使いいただくために、 以下のお手入れを行ってください。



エアフィルタ

をうすめたぬるま湯で洗浄し、


陰干ししてください。

お手入れの方法


フレキシブルチューブ、アダプタ、 マスクを、中性洗剤をうすめた ぬるま湯で洗浄します。




2 洗剤を流水で十分に 洗い流します。

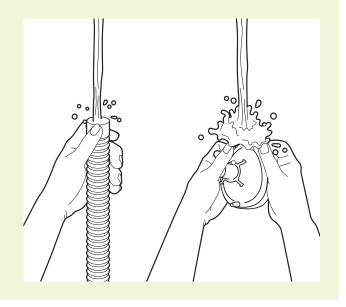

風通しのよいところで陰干しします。 フレキシブルチューブは吊り下げて、マスクやアダプタはタオルなどの上に置いておくと良いでしょう。

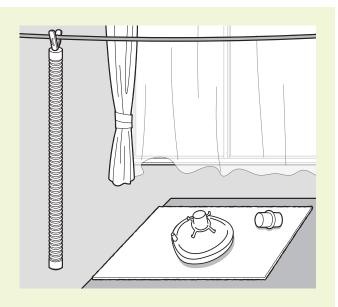


4 乾燥後はほこりがつかない ように、袋などに入れて 保管します。

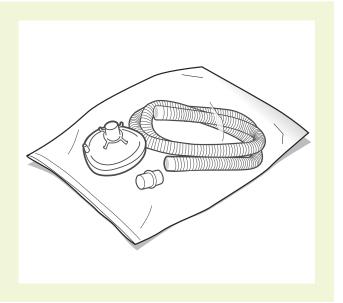

⚠ 次の方法でのお手入れはおやめください

日当たりの良い所で干さないでください。

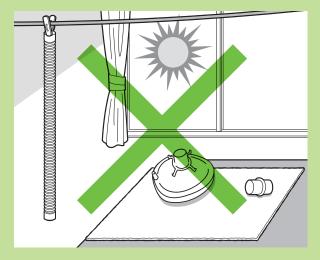

ベンジン、アルコール、塩素系洗剤 などで洗わないでください。



機器の準備

機器の設置



機器をしっかりとした平らな台など に置きます。直射日光があたらない 場所に設置してください。



エアフィルタ収納部 (吸気口)がカーテンなどでふさがれていないことを確認してください。

機器トラブル発生時の対応

最寄りの弊社営業所や夜間・休日は機器安全センターまでご連絡ください。

(連絡先は下記をご確認ください。)

平日 9:00~18:00の受付

夜間・土日休日の受付

地域営業所·出張所·駐在

(平日18:00~翌9:00、土・日曜日と祝祭日)

機器安全センター フリーダイヤル **0120-633-881**

MEMO			